

DERMATOME ELECTRIQUE, KIT COMPLET

SOC-M10111



Description du Dermatome électrique, kit complet

Pièce à main de dermatome avec système de moteur électro-chirurgical.

Le Dermatome est utilisé dans le but d'écortcher les zones de la peau contenant des lésions lors des opérations dermatologiques, en obtenant des greffes cutanées. A cet effet, le médecin peut ajuster l'épaisseur de la zone à retirer, c'est-à-dire la profondeur de pénétration et la largeur de coupe du dermatome.

Le système mécanique du dermatome transmet le mouvement de rotation du moteur électrique alimenté par batterie au mouvement d'oscillation de la lame. La fréquence d'oscillation est ajustée en poussant et en relâchant la gâchette. Des piles spéciales amovibles rendent la stérilisation à la vapeur possible. Mécanisme de changement de lame conçu pour insérer la lame d'un seul côté, évitant ainsi une insertion incorrecte de la lame.

L'épaisseur de coupe peut être ajustée de 0,10 mm à 1,0 mm en 10 étapes par un seul doigt. 8 rabats permettent d'ajuster la largeur de coupe de 9,75 mm à 78mm. La gâchette a un mécanisme de verrouillage sûr qui empêche le fonctionnement indésirable du moteur.

Caractéristiques techniques :

- Autoclavable;
- Conditions de stérilisation: 2 bar 1340C (max);
- Vitesse max (rpm): 16 000 rpm;
- Dimensions: 283 x 90 x 42 mm ;
- Poids: 1080 g.

Composition du Kit :

- Alimentation Dermatome pour usage électrique
- Câble électrique pour pièce à main dermatome
- Lame de dermatome (10 pièces)
- Support de dermatome PPSU
- Panier perforé en acier inoxydable - avec couvercle
- Conteneur 3/4 modèle standard - fond gris non perforé - couvercle perforé
- Filtre en papier à usage unique avec indicateur marqué - (paquet de 100 pièces)
- Sceau de sécurité - rouge (paquet de 100 pièces) - sans indicateur
- 2 Étiquette en papier avec indicateur - (paquet de 100 pièces)