

INDICATEURS PHYSICO-CHIMIQUES DE STÉRILISATION

Rubans indicateurs pour poupinel



Présentation

Les rubans indicateurs pour poupinel se présentent sous la forme d'un ruban adhésif de couleur beige avec des **stries vertes qui deviendront brunes pendant la stérilisation.**

Informations générales

La stérilisation par chaleur sèche fait appel à deux paramètres :

- . Le temps
- . La température

Ce ruban est conçu pour résister aux températures très élevées et l'encre dont il est imprimé, vire du vert au brun

aux conditions suivantes :

- . 1 h 30 à 180°C
- . 2 h 00 à 160°C

Les rubans indicateurs pour poupinel servent uniquement de témoin de passage pour différencier les lots stérilisés

des lots non stérilisés. Ils ne garantissent en rien la stérilité des produits soumis au cycle de stérilisation.

Conditions de stockage

Les indicateurs pour chaleur sèche doivent être stockés dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière et de tout solvant et réactif.

Durée de conservation : 24 mois

Ruban indicateur chaleur sèche à fixer de préférence à l'intérieur et à l'extérieur des boîtes



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration